

Pibella Comfort

Uriniersystem für Frauen - **im Liegen oder Sitzen**



Die **Pibella Comfort** Urinierhilfe ermöglicht es der Frau liegend oder sitzend geschützt zu urinieren, wo und wie sie auch immer auf dieser Welt unterwegs ist.

Pibella Comfort wurde speziell für den einfachen und problemlosen Gebrauch im Liegen oder Sitzen konzipiert.

Auf Reisen, ob im Zelt, Massenlager, Schlafsack, in der Nacht, also immer wenn das Wasserlösen für die Frau kompliziert und unangenehm, schamhaft wird oder die Toiletten schwierig erreichbar oder nicht zumutbar sind, es draussen zu kalt oder stürmisch ist, dann kann „frau“ mit **Pibella Comfort** liegend oder sitzend urinieren.

Pibella Comfort ist eine grosse Wohltat für Patientin und Pflege. Sie wird seit 2006 in Krankenhäusern, Altersheimen und in der Pflege zu Hause mit Erfolg eingesetzt.

Bei Krankheit, Unwohlsein, Knochenbrüchen, vor und nach Operationen, während und nach der Schwangerschaft und in der Nacht, wenn das Aufstehen schwierig oder nicht möglich ist, erweist sich **Pibella Comfort** für Patientin und Pflegeperson als wunderbar angenehm und diskret. Schmerzen, Scham, Stress und Aufwand werden vermindert – und sogar Kosten gesenkt. Dies belegen Studien aus Krankenhäusern.

Pibella Comfort kann auch problemlos in sitzender Position angewendet werden. Zum Beispiel im Auto, auf der Bettkante und teilweise auch im Rollstuhl.

Die **Pibella Comfort** ist abperlend, maschinenfest, spül- und auskochbar (bis 135°C) und unendlich oft verwendbar. Die Urinbeutel können für den persönlichen Gebrauch vielfach benutzt werden und sind nachbestellbar.



Tipps und weitere Angaben

Bei jeder Lieferung ist eine genaue Anleitung beigelegt. Zudem wird mit Illustrationen schön gezeigt, wie zuerst einfach an der Hand geübt werden kann.

Der Harnröhrenausgang wird mit **Pibella** komplett umschlossen. Es geht kein Tropfen oder Spritzer daneben und „frau“ bleibt absolut trocken. Mit der Führungszunge kann das letzte Tröpfchen abgestreift werden.

Pibella funktioniert bei allen Frauen. Bei der ersten Anwendung braucht es ein wenig Mut den Urin fließen zu lassen. Danach wird es schnell zur Routine.

Erlebnisberichte von reisenden Frauen, Aussagen von Patientinnen und Referenzschreiben von renommierten Fachpersonen aus Krankenhäusern sind aufgeführt unter www.pibella.com.

Pibella wurde aufgrund einer familiären Betroffenheit entwickelt und steht nun allen Frauen zur Verfügung. Diese einzigartige Urinierhilfe wird weltweit vom Teenager bis zur Oma geschätzt.

Pibella Travel & Comfort
sind Gewinner des
REHACARE DESIGN AWARD



Jury: Mitglieder aus der
Rehabilitations- und Designindustrie



Medizinalprodukte nach Europäischer Richtlinie 93/42/EWG, Anhang VII

CE - zertifiziert

Die Produktion erfolgt ausschliesslich in der Schweiz unter modernsten und hygienischen Bedingungen.

Es werden nur allergiefreie Materialien eingesetzt. Wasserabstossend.

100% recycelbar oder umweltgerecht entsorgbar.

Patent weltweit veröffentlicht. Modèle déposé.

www.pibella.com

